

BD Cathena™

Cathéter IV sécurisé

BD Cathena™ est le cathéter IV sécurisé tout-en-un qui s'associe à vos priorités et répond à vos attentes : le bien-être du patient, la précision et la sécurité.




1 Confirmation continue de l'insertion du cathéter

Les cathéters IV sécurisés BD Cathena™ intègrent un système de confirmation basé sur un **retour triple** pour plus de précision lors de la mise en place et un contrôle du retour veineux.

La technologie de mandrin BD Instaflash™ visible dans la canule fournit une confirmation immédiate de l'entrée dans le vaisseau.

La confirmation secondaire correspond au moment où le sang apparaît dans la **chambre de visualisation du retour veineux** après avoir abaissé et avancé le cathéter, confirmant que le cathéter est dans le vaisseau.

Le troisième retour a lieu lorsque le sang afflue dans l'**embase de cathéter colorée** à mesure que le mandrin est retiré, fournissant ainsi une autre confirmation.

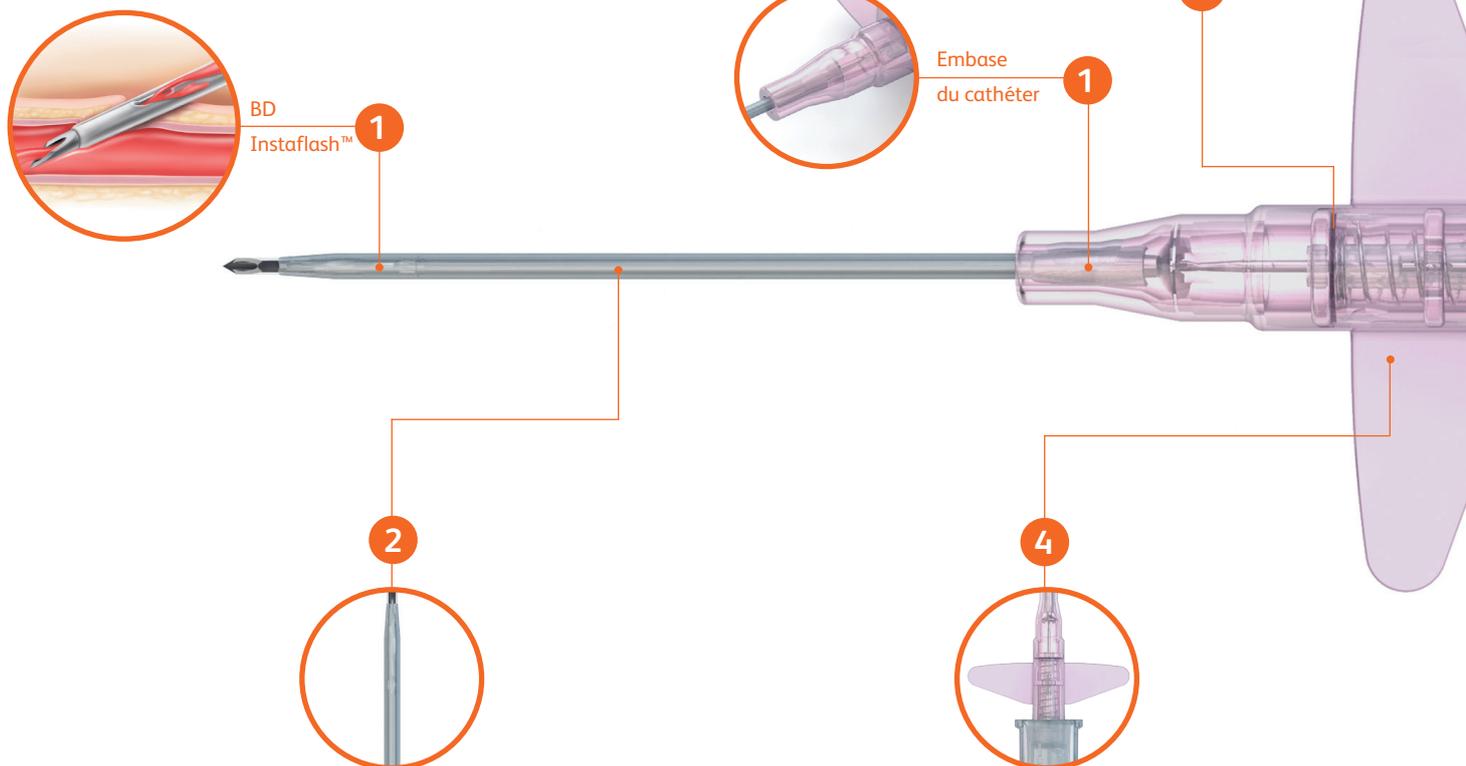

2 Biomatériau BD Vialon™

S'assouplit à la chaleur corporelle lorsqu'il est dans la veine, ce qui permet de prolonger la durée de cathétérisme.¹

3 Toucher et contrôle pendant l'insertion


Le cathéter BD Cathena™ est conçu de manière ergonomique pour se comporter comme une extension de votre main. L'ergot est conçu pour fournir un engagement tactile pendant l'insertion. Cela vous permet de continuer à utiliser vos **techniques habituelles de pose**.

4 Une palette de configurations pour s'adapter à vos préférences

Les cathéters BD Cathena™ sont livrés **avec ou sans ailettes** pour s'adapter à vos préférences.

5 Technologie BD Multiguard™

Conçue pour minimiser l'exposition au sang lors de l'insertion initiale du cathéter et **éliminer le besoin de compression veineuse** lors des connexions et déconnexions ultérieures.

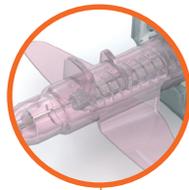

5



Chambre de visualisation

1



7



6



6 Sécurité passive compacte

Le cathéter BD Cathena™ est conçu de manière ergonomique pour s'adapter facilement aux techniques d'insertion actuelles. La **mise en sécurité passive** de l'aiguille aide à vous protéger contre les blessures par piqûre d'aiguille et l'exposition au sang.

7 Bouchon évent amovible

Cathéter pour injection à haute pression

Les cathéters BD Cathena™ sont compatibles avec une injection jusqu'à une pression de **325 PSI**.

Caractéristiques et références de commande

Les cathéters IV de sécurité BD Cathena™ sont disponibles en cinq gauges de couleur différente pour faciliter leur identification.

Cathéter BD Cathena™
doté de la technologie
BD Multiguard™



Cathéter BD Cathena™ à ailettes
doté de la technologie BD
Multiguard™



Cathéter
BD Cathena™



Cathéter BD Cathena™
à ailettes



Gauge	Longueur du cathéter (mm)	Diamètre interne (mm)	Diamètre externe (mm)	Débit (ml/min)	Haute pression maximale (PSI)	Condi- tionnement boîte / carton	Numéro de référence
<i>Cathéter IV de sécurité BD Cathena™ sans ailettes doté de la technologie BD Multiguard</i>							
24 G	19	0,53	0,71	21	325	50/200	386807
22 G	25	0,67	0,90	38	325	50/200	386806
20 G	25	0,83	1,10	66	325	50/200	386803
20 G	32	0,83	1,10	64	325	50/200	386804
20 G	51	0,83	1,10	57	325	50/200	386805
18 G	32	0,98	1,31	94	325	50/200	386801
18 G	51	0,98	1,31	87	325	50/200	386802
<i>Cathéter IV de sécurité BD Cathena™ à ailettes doté de la technologie BD Multiguard</i>							
24 G	19	0,53	0,71	21	325	30/120	386815
22 G	25	0,67	0,90	38	325	30/120	386813
22 G	51	0,67	0,90	33	325	30/120	386814
20 G	25	0,83	1,10	66	325	30/120	386810
20 G	32	0,83	1,10	64	325	30/120	386811
20 G	51	0,83	1,10	57	325	30/120	386812
18 G	32	0,98	1,31	94	325	30/120	386808
18 G	51	0,98	1,31	87	325	30/120	386809
<i>Cathéter IV de sécurité BD Cathena™ sans ailettes</i>							
16 G	32	1,36	1,74	212	325	50/200	386816
16 G	51	1,36	1,74	200	325	50/200	386817
<i>Cathéter IV de sécurité BD Cathena™ à ailettes</i>							
16 G	32	1,36	1,74	212	325	30/120	366819
16 G	51	1,36	1,74	200	325	30/120	386820

BD Cathena™, cathéter veineux périphérique de sécurité utilisé pour la perfusion et l'injection.
Classe IIa (Dir 93/42/CE), CE 0086, Mandataire européen : BD Temse, Belgique.
Pour un bon usage de ces produits, lire attentivement les recommandations d'utilisation.
Pris en charge par l'assurance maladie.

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR

bd.com/fr

